



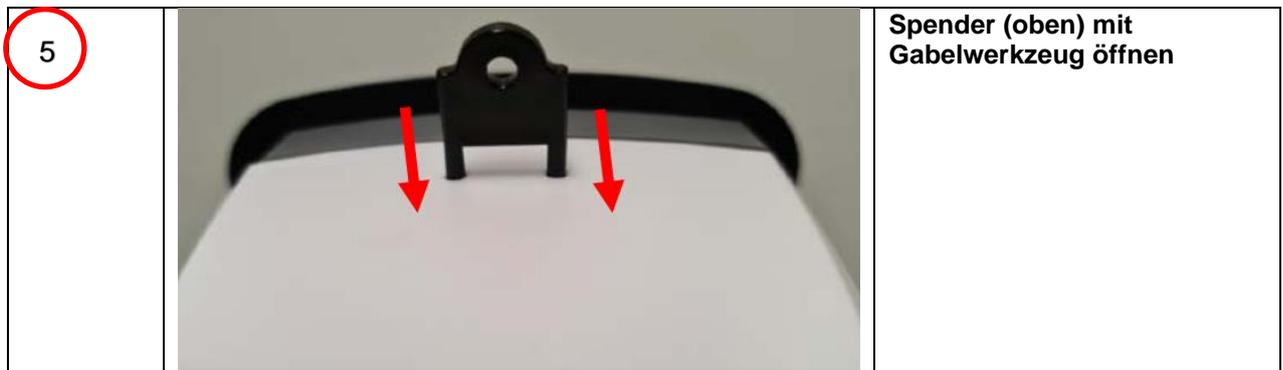

Montage-Anleitung

"TOUCHLESS" Desinfektionsspender auf Ständer


<p>1</p>		<p>Spender auspacken und Montageteile bereitlegen (Es werden nicht alle Schrauben benötigt)</p>
<p>2</p>		<p>Ständer auf Bodenplatte mit Schraube lang, Metallblende und Unterlagscheibe befestigen</p>

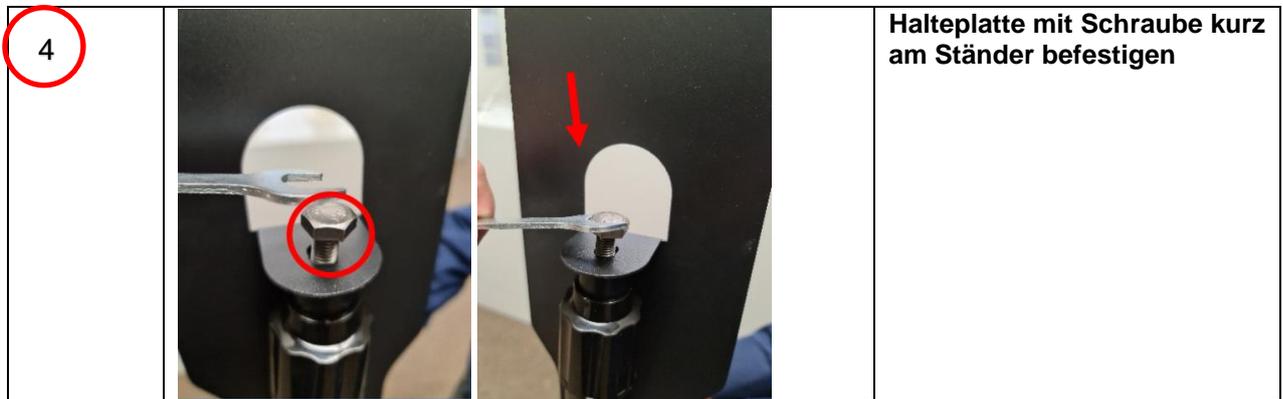

<p>7</p>		<p>Gewünschte Pumpe / Düse bis zum Anschlag in den Tank schieben:</p> <p>Metallspitze (Messing) für flüssiges Desinfektionsmittel</p> <p>Kunststoffspitze <u>ohne Metall (Messing)</u> für Desinfektions-Gel</p>
<p>8</p>		<p>Pumpe und Tank im Gerät einrasten</p> <p>Dabei die zwei Hebel an der Pumpe zusammendrücken</p>
<p>9</p>		<p>Achten Sie darauf, dass die Hebeplatte und die Pumpe aufeinanderpassen. Im Idealfall soll in Ruheposition etwas Abstand zwischen Hebeplatte und Pumpenfalz befinden.</p>

<p>10</p>			<p>Mitgelieferte Batterien (können vom Bild abweichen) korrekt einlegen</p>
<p>11</p>			<p>Batterie-Fach schliessen und einrasten</p>
<p>12</p>		<p>Tank öffnen – Desinfektionsmittel einfüllen – Tank schliessen</p>	

<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">13</div>		<p>Gerät schliessen und einrasten</p> <p>Gerät an der rechten Seite einschalten</p>
--	---	---

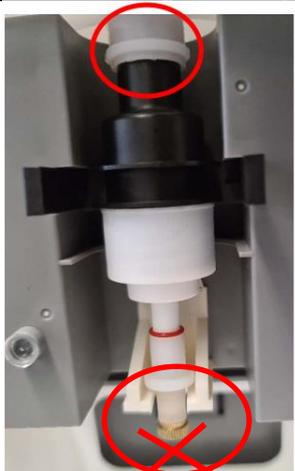Von uns empfohlene Desinfektionsmittel:	
DERMATEC ALCO GEL Hand-Desinfektions-Gel 5L-Kanister Art. Nr. 23094.0014	DERMATEC ALCO flüssig Hand-Desinfektionsmittel 5L-Kanister Art. Nr. 23095.0014
Verhinderung von Tropfen / Undichtigkeit:	
	
<p>Wenn Sie GEL verwenden, entfernen Sie unten die Messingdüse. Ansonsten wird sie vom GEL verstopft.</p> <p>Kontrolle ob die Pumpe korrekt und bis zum Anschlag im Tank sitzt und die Dichtungsringe korrekt sitzen.</p>	<p>Zwischen Hebetisch und Pumpenfalz muss in Ruheposition etwas Abstand sein. Wird die Pumpe angehoben öffnet sich das Ventil und das Desinfektionsmittel kann auslaufen.</p>

Haben Sie noch Fragen? Gerne sind wir für Sie da:

 +41 44 711 10 90
 mail@ibzag.ch